	SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRESTAZIONE	Pag. 1 a 2
---	---	------------

PASTA ADESIVA PER DENTIERE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo medico è una pasta adesiva indicata per far aderire e trattenere la protesi dentale ancorata alle gengive dell'utilizzatore.

Il dispositivo medico è fornito non sterile e non è prevista la sua sterilizzazione prima dell'utilizzo. Il dispositivo è confezionato in un tubo da 40 g ed è pronto all'uso.

Indicazioni d'uso

Il dispositivo medico è indicato per far aderire e trattenere la protesi dentale ancorata alle gengive dell'utilizzatore. L'uso della pasta adesiva è indicato per 1-2 volte al giorno.

Utilizzatori previsti

Il dispositivo medico è destinato ad utilizzatori profani per le indicazioni d'uso previste dal fabbricante.

Il dispositivo medico è destinato ad essere utilizzato in ambiente domestico.

All'utilizzatore sono fornite tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.


Modalità d'utilizzo

Il dispositivo medico è pronto all'uso e va utilizzato per far aderire e trattenere la protesi dentale ancorata alle gengive dell'utilizzatore. L'uso della pasta adesiva è indicato per 1-2 volte al giorno.

Le modalità di utilizzo sono riportate di seguito:

- Pulire e asciugare accuratamente la protesi.
- Applicare la pasta nei punti indicati nell'illustrazione, mantenendosi lontano dai bordi.
- Sciacquare la bocca prima di indossare la protesi.
- Applicare la protesi tenendola premuta in posizione per qualche istante. Attendere qualche minuto prima di mangiare e bere.

Per una corretta conservazione delle caratteristiche di prestazione e sicurezza del dispositivo medico si raccomanda di richiudere correttamente il tappo al termine di ciascun utilizzo.

	SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRESTAZIONE	Pag. 2 a 2
---	---	------------

Avvertenze

Prima dell'uso leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante. Non utilizzare in caso di lesione delle mucose. Interrompere il trattamento in caso di insorgenza di qualsiasi effetto indesiderato.

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi; risciacquare accuratamente in caso di contatto oculare accidentale.

Conservare in luogo asciutto, lontano dal calore e dai raggi solari, a temperatura inferiore a 25°C.

Non congelare.

Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Richiudere correttamente il tappo dopo ciascun utilizzo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e conservato in modo corretto.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Per ridurre il rischio di contaminazione crociata si raccomanda di non condividere il prodotto con altri utilizzatori.

L'efficacia e la durata della forza adesiva possono variare a seconda delle caratteristiche fisiche personali (salivazione, anatomia della bocca, stato generale di salute, età).

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al Fabbricante e all'Autorità competente dello stato membro in cui l'incidente si è verificato.

Controindicazioni

Il dispositivo medico non è indicato per i soggetti con nota ipersensibilità ai componenti presenti nella formulazione.

Rev.00 del 09.01.2026